

SISTEMA PER NON UDENTI

*LISTEN EVERYWHERE*



Listen **EVERYWHERE**  
FROM LISTEN TECHNOLOGIES

### **Fase 1**

Scarica l'applicazione *Listen Everywhere* sull'App Store / Play Store.

---

### **Fase 2**

Attivare la modalità aereo sul telefono.

---

### **Fase 3**

Collegati al wifi "malentendant" e inserisci la password.

Per ricevere la password, si prega di inviare la richiesta a [julie.devaud@fdv19.ch](mailto:julie.devaud@fdv19.ch)

---

### **Fase 4**

Apri l'applicazione *Listen Everywhere* e clicca sul pulsante "malentendants".

Collega le cuffie tramite l'ingresso Jack o accendi il sistema Bluetooth del telefono.

Per sfruttare al meglio il sistema in funzione, è meglio lasciare il telefono all'aperto.

Fête des 20  
Vignerons 19